

## Solution de zinc et de formol

**Description:** La solution de zinc et de formol est un fixateur tissulaire pour les procédures de routine et dans diverses procédures de coloration spéciales.

**Utilisations/Limites :** Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement.  
Applications histologiques.  
Faire non Utilisez la date d'expiration dépassée.  
Soyez prudent lors de la manipulation de ces réactifs.

**Disponibilité/Contenu :**

<u>Article #</u>	<u>Volume</u>
ZFN125	125 ml
ZFN500	500 ml
ZFN999	1000 ml

**pH:** 4.0 (Ajuster si vous le souhaitez).

**Stockage:** Conserver à température ambiante.

**Procédure (standard) :**

1. Coupez l'échantillon à la plus petite taille possible.
2. Couvrez le tissu avec une quantité de liquide égale à 20 fois le volume de l'échantillon.
3. Les temps de fixation varient de 5 à 48 heures selon la taille de l'échantillon.

**Précautions:** Poison. Ne pas prendre en interne.

Stockage : 18° C



25° C



ScyTek Laboratories, Inc.  
205 South 600 West  
Logan, UT 84321  
U.S.A.



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem, The Netherlands